

Notwendige Schritte im Krankenhaus zur Vorbereitung von Produkten für die Aufbereitung

**Achtung!**

- Beachten Sie folgende Punkte, damit der Aufbereitungserfolg nicht gefährdet wird:
- Vorbereitung und Reinigung beim Anwender unmittelbar nach dem Einsatz der Medizinprodukte, damit Rückstände nicht eintrocknen und somit schwerer zu entfernen sind
- sachgemäßes Vorbereiten und Vermeiden von Beschädigungen, da diese die Aufbereitung erschweren oder unmöglich machen
- Bewahren Sie immer die kompletten Herstellerinformationen einschließlich der Kennzeichnung und das Originalzubehör auf

**Vorsicht!**

- Infektionsgefahr durch biogefährliche Güter!
- Behandeln und lagern Sie die Medizinprodukte gemäß den geltenden Schutzbestimmungen. Benutzen Sie Schutzhandschuhe.
- Sehen Sie keine Produkte von Risikopatienten mit bekannter oder Verdacht auf Infektion mit HBV, HCV, sCJK/ vCJD[TSE] oder Produkte, die mit Radiopharmaka / Zytostatika kontaminiert sind, für die Aufbereitung vor.

**Hinweis**

In der gemeinsamen Verantwortung für die zur Anwendung kommenden Medizinprodukte ist es notwendig sicher zu stellen, dass Ascamed die zum Produkt gehörigen Herstellerinformationen erhält (Gebrauchsanweisung; Kennzeichnung d.h. Herstellerlabel auf Produkt und/oder Umverpackung.)

**Vorbereiten und Prüfen**

Sammeln und reinigen Sie nur vollständige und mechanisch unbeschädigte Medizinprodukte (ohne Kratzer, Risse oder sonstige Beschädigungen).

**Reinigungshinweise**

- Verwenden Sie bevorzugt kaltes, demineralisiertes Wasser zur Reinigung der Medizinprodukte.
- Verwenden Sie keine Desinfektionsmittel. Führen Sie keine thermische Desinfektion durch.
- Besondere Ansprüche müssen an die Vorbereitung von Lumenkathetern gestellt werden. Das Durchspülen der Lumen ist Voraussetzung für den Aufbereitungserfolg. Für gespülte Ablationskatheter stellt daher die Ascamed Spritzen mit Spülflüssigkeit bereit, die per LuerLock an den Katheter konnektiert werden und zum Spülen und anschließendem Trocknen verwendet werden sollen.
- Die gereinigten Produkte wischen Sie mit einem sauberen Tupfer trocken.

**Verpacken**

Legen Sie das gereinigte, trockene Produkt in den Sammelbeutel und verschließen Sie ihn mit dem Zippverschluss.

**Lagern**

Legen Sie den Sammelbeutel gemeinsam mit den Herstellerinformationen (Label) in die Sammelbox.

Halten Sie die Sammelbox stets verschlossen und öffnen Sie diese nur zum Einlegen der vorgereinigten Produkte.

**Hinweis**

Schützen Sie mechanisch empfindliche Medizinprodukte möglichst vor anderen beiliegenden Produkten, um Beschädigungen zu vermeiden.

Zu diesem Zweck stellt Ascamed für Renale Ablationskatheter und Transseptalnadeln separate Sammelröhren zur Verfügung (siehe separate Hinweise). Achten Sie auf die exakte Beschriftung der Sammelröhren (Krankenhaus).

**Abholung**

Füllen Sie den Einlieferungsschein aus und legen Sie ihn auf der Box bereit. Die Sammelbox wird mit den beigelegten Plomben verschlossen. Falls kein regelmäßiger Abholtermin vereinbart ist, benachrichtigen Sie unseren Kundenservice (03473 2258-0).